


## パリスティンジェミニ／ジェミニ AS


### フィルターの交換方法

パリスティンジェミニ／ジェミニ AS には、排気フィルターが 1 枚装備されています。

- ① 新しいフィルターの包装を取り外します。
- ② 大きい扉と引き戸を開け、内部天井奥に取り付けてある古いフィルターを手前にスライドさせ取り外し、新しいフィルターを取り付けます。この時、空気の流れを示す矢印がユニット前面から見えることと、矢印が上向きに向いていることを確認してください。

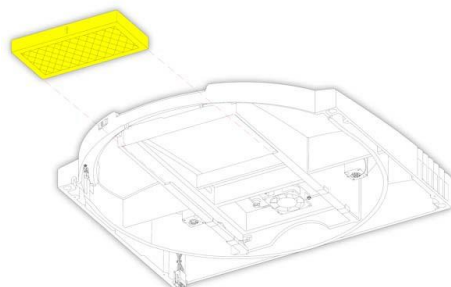

フィルターを溝に沿って、ユニット背面に向かってスライドさせます。この時、フィルターがバネ式カバー上にスライドし、溝の奥に固定されたことを確認してください。

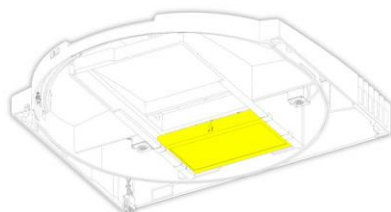

必ずフィルターは取り付けてください。フィルターが装備されていない場合、ファンは動作しません。



フィルターの交換時期が来たら交換してください。3ヶ月に1回の交換を推奨いたします。

### 3. オーダーインフォメーション

9990610	フィルター(試薬ガス用)	1 個
7411258	フィルター(試薬ガス用)	6/包

202404